



IVF (IN-VITRO FERTILIZATION)

一次性长款腔内穿刺架 IVF取卵专用一次性超声穿刺架

IVF 取卵，卵巢囊肿治疗



立普医疗·超声介入产品整体解决方案供应商

www.leapmed.com

- 精准引导，与穿刺引导线精准匹配
- 使用便捷，提高效率，方便医生使用
- 符合人体工程学的流线形设计，减少病人的不适感
- 一次性自毁设计，减少感染和交叉感染的风险，使超声介入更安全

IVF取卵专用一次性超声穿刺架

匹配探头型号

使用步骤图



1

安装探头套

超声探头涂抹耦合剂，
覆盖无菌探头套



2

安装穿刺架

穿刺架与超声探头固定点配合
安装，按压锁住锁紧拉扣



3

穿刺

穿刺手术



4

一次性抛弃

撕除锁紧拉扣
抛弃已使用穿刺架

GE Healthcare



GE IC5-9-D/E8C/Samsung VR5-9

GE RIC5-9-D/Samsung V5-9



PHILIPS

Philips CV C9-4V

Philips C8-4V/C10-3V

SIEMENS

Siemens EC9-4(X)/Vino G4-9E

Siemens EC9-4(S)/Toshiba 661VT

**HITACHI
ALOKA**

Hitachi V53W Aloba UST-984-5

Hitachi V73W/C41V1

Aloba UST-9124/9118

Aloba C41B

mindray
healthcare within reach

Mindray V10-4/6CV1/V11-3BE

V11-3E/V11-3U/65EC10

以上使用步骤仅供大家参考，具体使用请严格按照说明书
更多一次性产品正在研发，若无匹配的一次性穿刺架，
可定制金属穿刺架。