



## ABDOMINAL BIOPSY

### 一次性标准角度型穿刺架 腹部介入一次性超声穿刺架

肝肾活检、囊肿治疗、PTCD、肿瘤消融



立普医疗 · 超声介入产品整体解决方案供应商

[www.leapmed.com](http://www.leapmed.com)

- 匹配引导线,方便医生预判手术路径,带来更精准的手术体验
- 10款不同规格的针槽,满足活检/治疗置管引流等不同临床应用
- 一次性自毁设计,减少感染和交叉感染的风险,使超声介入更安全

# 腹部介入一次性超声穿刺架

## 匹配探头型号

## 使用步骤图



# 1

### 安装探头套

超声探头涂抹耦合剂，  
覆盖无菌探头套



# 2

### 安装穿刺架

穿刺架与超声探头固定  
点配合安装，按压锁住  
锁紧拉扣



# 3

### 选择合适的角度模式 和针槽

选择与活检针等匹配的针  
槽，按压角度调节按钮切  
换所需角度



# 4

### 穿刺手术 针架分离

穿刺手术。可通过拔出  
针槽实现针架分离功能



# 5

### 一次性抛弃

撕除锁紧拉扣  
抛弃已使用穿刺架

GE Healthcare



GE C1-5/C1-5-D GE C1-6-D/C1-6-VN  
GE 4C/4C-A/4C-D/4C-RS/Samsung CS1-4  
GE 3CRF-D GE C2-9-D GE C2-6b-D



Philips C5-1 Philips C9-2  
Philips CV C5-2 Philips HD C5-2



Siemens 4V1 Siemens 4C1  
Siemens 6C1HD



Aloka UST-9133  
Hitachi B512 Aloka C251  
Aloka UST-9130/9126/9123  
Hitachi C715/C25



Esaote CA541 Esaote AC2541



Mindray SC5-1U  
Mindray C5-2E/C5-2/C5-2S



Sonosite C60/C60e/C60X



Toshiba 375BT

以上使用步骤仅供大家参考，具体使用请严格按照说明书  
更多一次性产品正在研发，若无匹配的一次性穿刺架，  
可定制金属穿刺架。