



易达包

易如反掌 包罗万象


超声介入产品整体解决方案

一次性超声穿刺包

一次性超声穿刺架

一次性超声探头套

一次性无菌耦合剂

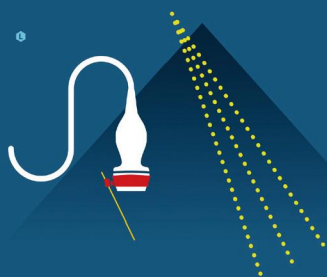

精准



便捷



安全



肝胆外科 肾脏科 超声科

与机器引导线匹配, 多角度可调

适用于肝活检、肾活检、肝肾囊肿置管引流、PTCD、肿瘤消融治疗



甲状腺、乳腺外科 超声科

进针角度自由调节, 针尖实时显示

适用于甲状腺FNA、活检、乳腺活检、浅表淋巴结活检、肿瘤消融治疗



生殖中心 妇产科 产前诊断中心

长款腔内穿刺架

适用于B超下采卵、羊水脐带血穿刺、卵巢囊肿治疗

超声引导下经皮肾镜取石术PCNL



泌尿外科

短款腔内穿刺架

经会阴或经直肠前列腺活检和粒子植入



麻醉科 疼痛科 肿瘤科 血管外科 急诊重症

进针角度自由调节, 针尖实时显示

超声可视化局部神经阻滞、疼痛治疗、静脉置管


大静脉置管、PICC、CVC、PORT




一次性超声穿刺包

- 介入超声整体解决方案,更优化的流程,更精准的穿刺,更低的交叉感染和感染风险。
- 一次性超声穿刺包包含:一次性超声穿刺架,无菌超声探头套,无菌耦合剂,固定圈。
- 一次性超声穿刺架引导精准穿刺,“针”实可见。
一次性超声探头套,感控与清晰影像共存。
一次性无菌耦合剂,方便安全。



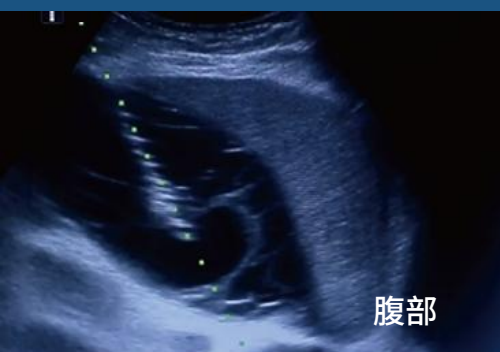

腹部

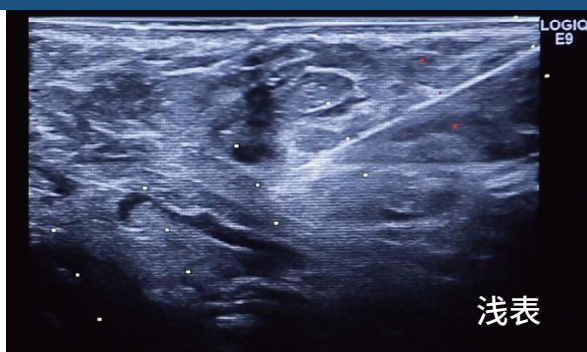

浅表



腔内

我们的专利设计

多角度调节,精准匹配引导线

锁紧拉扣,更安全更放心

全尺寸针槽配置,满足不同需求



针架分离,方便快捷

一次性超声探头套


杜绝交叉感染风险, 手术更安全

PU材质, 清晰影像保证, 杜绝乳胶过敏可能

3D折叠, 流程优化, 操作更便捷

使用说明

1. 超声探头表面涂抹适量耦合剂
2. 遵循无菌操作, 抓取探头, 确保探头套与超声探头声透镜间无气泡。
3. 向下牵拉探头套指示端, 确保探头套全部打开覆盖超声探头线缆
4. 使用固定圈固定探头套, 确保无移动, 安全可靠。
5. 手术操作前检查确认探头套表面无破损

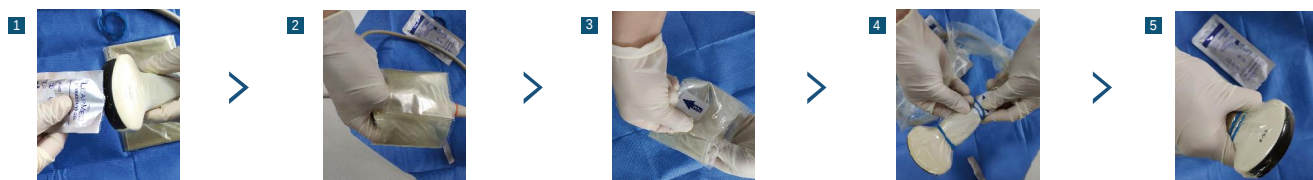

订货号	产品名称	产品型号	材质	备注
10400101	一次性使用隔离套	B	PU	14*90cm, 体外探头用
10400201	一次性使用隔离套	B	PU	14*120cm, 体外探头用
10400301	一次性使用隔离套	B	PU	14*150cm, 体外探头用
10400601	一次性使用隔离套	B	PU	14*61cm, 体外探头用
10400701	一次性使用隔离套	B	PU	9*92cm, 体外探头用
10400801	一次性使用隔离套	B	PU	4.5/15*40cm, 腔内探头用

订货号	产品名称	产品型号	备注
10300101	一次性使用医用超声耦合剂	LPGELSa10	袋装10ml
10300201	一次性使用医用超声耦合剂	LPGELSa20	袋装20ml
10300301	一次性使用医用超声耦合剂	LPGELSa40	袋装40ml
10300401	一次性使用医用超声耦合剂	LPGELSy10	推注式10ml
10300501	一次性使用医用超声耦合剂	LPGELSy20	推注式20ml
10300601	一次性使用医用超声耦合剂	LPGELSy40	推注式40ml

» 标准角度型穿刺架



1. 安装探头套

超声探头涂抹耦合剂，覆盖无菌探头套。



2. 安装穿刺架

穿刺架与探头固定点配合装配，按压锁住锁紧拉扣。



3. 选择合适的角度模式和针槽

选择与活检针匹配的针槽，按压角度调节按钮切换所需角度。



4. 穿刺手术，针架分离

穿刺手术。可通过拔出针槽实现针架分离功能。



5. 一次性抛弃

撕除锁紧拉扣，抛弃使用过的穿刺架。

» 自由角度型穿刺架




1. 安装探头套

超声探头涂抹耦合剂，覆盖无菌探头套。



2. 安装穿刺架

穿刺架与超声探头固定点配合装配，按压锁住锁紧拉扣。

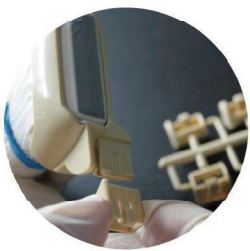

3. 选择合适的针槽

选择与活检针等匹配的针槽。



4. 穿刺手术，针架分离

穿刺手术。可以自由选择角度，可随时实现针架分离功能。



5. 一次性抛弃

撕除锁紧拉扣，抛弃已使用穿刺架。

» 腔内穿刺架



1. 安装探头套

超声探头涂抹耦合剂，覆盖无菌探头套。



2. 安装穿刺架

穿刺架与超声探头固定点配合装配，按压锁住锁紧拉扣。



3. 穿刺

穿刺手术。



4. 一次性抛弃

撕除锁紧拉扣，抛弃已使用穿刺架。